


## Confezione funzionale

### Uso svariato

La confezione funzionale può essere usata come prolunga per uno svuotamento diretto dell'urina nella toilette.

A questo scopo spingere il catetere il più avanti possibile finché il connettore chiude ermeticamente.

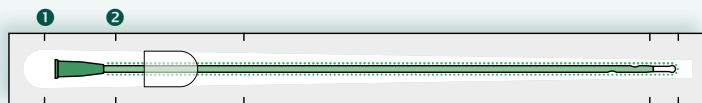

"Guaina di scorrimento"


#### Linee di strappo

- 1 Aprire
- 2 Strappando di scatto si ottiene un pezzo di pellicola ("guaina di scorrimento") che serve come ausilio per inserimento

## Catetere monouso per l'uso con gel lubrificante

**IQ 3204.xx** lunghezza 43 cm, immediatamente pronto per l'uso, gel lubrificante attivato, confezione funzionale, sterile

**Immediatamente pronto!**

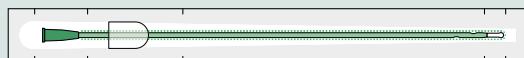

Misura\*

- CH 10
- CH 12
- CH 14
- CH 16
- CH 18

\* Il connettore è un codice colore per dimensione (CH=xx). Il diametro è specificato in Charrière (CH).

Avete domande riguardanti i cateteri monouso IQ-Cath.

Vi preghiamo di chiamarci o di scriverci una email.

**Tel. 02.99045678 r.a.  
info@manfredsauer.it**



**MANFRED SAUER ITALIA S.R.L.**

Viale della Repubblica 28 • 20037 Paderno Dugnano (MI)  
Tel. 02.99045678 r.a. • Telefax 02.91084256  
info@manfredsauer.it • www.manfredsauer.it



IT 2018-02  
REF 99.931



**MADE IN GERMANY** Sviluppiamo e fabbrichiamo i nostri prodotti a Lobbach, Germania.



**MANFRED SAUER GMBH**  
Hersteller von Medizinprodukten

Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany  
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011  
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com



**MANFRED SAUER GMBH**


Hersteller von Medizinprodukten

# IQ CATH

Immediatamente pronto per l'uso  
Gel lubrificante

**Catetere monouso  
per un cateterismo delicato**


## Cateteri a tre zone funzionali

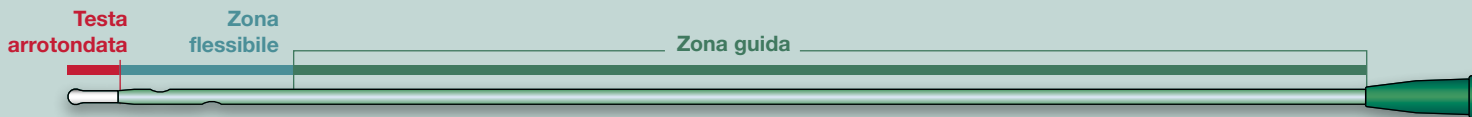

### Configurazione del catetere IQ-Cath


**4-6 volte al giorno, 150 volte al mese, 1800 volte all'anno:** così spesso chi pratica l'autocatereterismo intermittente infila il catetere nell'uretra per svuotare la vescica.

In questi casi è di fondamentale importanza la qualità e la sicurezza nell'uso dei cateteri, per prevenire dall'inizio qualsiasi tipo di lesione!

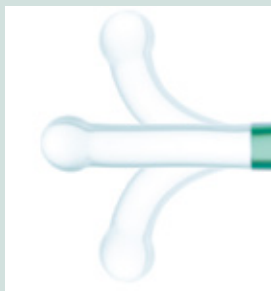

#### Testa arrotolata (brevettata)

La testa dell'IQ-Cath consiste in una sfera morbida che si trova nella parte anteriore estremamente morbida e flessibile. Attraverso questa combinazione il catetere può passare stenosi, diverticoli ecc. quasi senza resistenza.

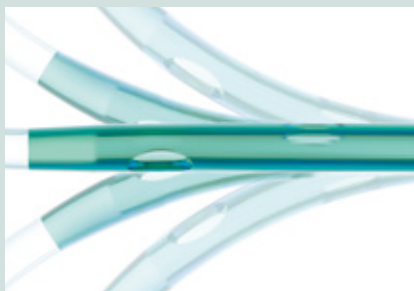

#### Zona flessibile (brevettata)

Grazie alla combinazione della testa arrotolata con la parte anteriore flessibile, IQ-Cath è capace di seguire il corso dell'uretra in modo delicato.



**Occhielli arrotondati:** Gli occhielli del catetere sono arrotondati per prevenire qualsiasi tipo di lesione dell'epitelio di rivestimento dell'uretra.



#### Zona guida


Quest'area dell'IQ-Cath che si estende fino al connettore è relativamente rigida, facilitando così l'inserimento.

I video dimostrativi sono stati realizzati dagli stessi utenti a scopo dimostrativo, con l'intenzione di aiutarvi a trovare il miglior metodo per maneggiare l'IQ-Cath effettuando l'autocatereterismo intermittente.



 Video IQ-Cath  
[www.iq-cath.com](http://www.iq-cath.com)




## Uso

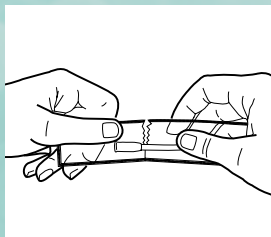

Aprire la busta di alluminio e prendere un catetere. Aprire la confezione funzionale alle linee di strappo vicine al connettore, poi, se necessario, attaccare una sacca di raccolta dell'urina al catetere.

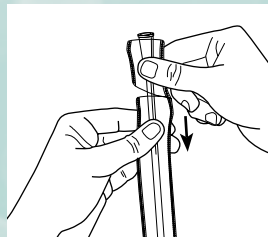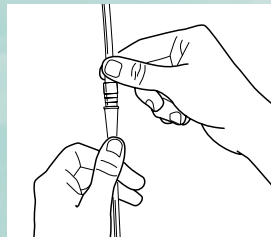

Usare le seguenti linee di strappo per strappare di scatto la confezione funzionale per ottenere un pezzo di pellicola con una lunghezza di 5 cm ("guaina di scorrimento") che serve come ausilio per l'inserimento.

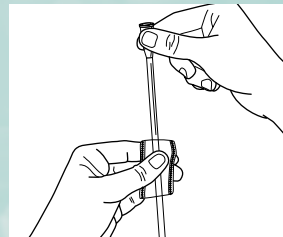

Muovere la guaina di scorrimento verso la testa arrotolata e così inserire il catetere di un modo sicuro e senza contatto diretto.

